

ISOMAR pršilo za nos za otroke

Izotonična raztopina morske vode in izvlečka kamilice z učinkom redčenja služi je namenjena vsakodnevni higieni nosu pri otrocih, starejših od 12 mesecev. Morska voda se pridobiva iz regije Cinque Terre v Liguriji (Italija), 3,5 milje od obale in na globini 6 metrov. Izotonična morska voda (s koncentracijo natrijevega klorida 0,9 %) nežno deluje na nosno sluznico, redči sluz in ostanke krvi, zato je primerna za majhne otroke, ki še ne znajo izpihati nosu. Izotonična morska voda in izvleček kamilice delujeta sinergijsko ter pomagata pri vsakodnevni higieni nosu otrok in zmanjšujeta suhost nosne sluznice. Otrokom prilagojena pršilna črpalka ima tanek nastavek in mehko razpršilno meglico, kar je še posebej primerno za otroški nos.

SESTAVINE: Aqua, *Maris Aqua, izvleček cvetov Chamomilla Recutita, glicerol. *Izotonična raztopina. Brez konzervansov. Inerten pogonski plin: dušik.

UPORABA: Prehlad, sinusitis, bronhitis, astma, alergije (vključno s senenim nahodom).

ISOMAR pršilo za nos za otroke je priporočljivo za otroke, starejše od 12 mesecev. Zaradi svojega učinka redčenja služi je primerno za vsakodnevno uporabo, saj povečuje vlažnost nosne sluznice. Pri otrocih, ki še ne znajo izpihati nosu, pripomore k boljši prehodnosti nosnic.

ISOMAR pršilo za nos za otroke je primerno za dolgotrajno in pogosto uporabo tako pri otrocih kot pri odraslih.

NAVODILO ZA UPORABO: Za pravilno uporabo nežno vstavite le manjši del pršilnega nastavka (tanek nastavek) v nosnico in po potrebi razpršite 1-krat ali 2-krat v vsako nosnico, do 3-krat na dan. **ISOMAR pršilo** se lahko uporablja v navpičnem ali vodoravnem položaju, kar omogoča enostavnejše in temeljitejše čiščenje nosu pri odraslih in otrocih. **NAVPIČNO:** uporaba v pokončnem položaju omogoča boljši doseg vseh predelov znotraj nosnega pretina za hitrejšo in temeljitejšo čiščenje. **VODORAVNO:** pri otrocih, starejših od 12 mesecev, nanesite izdelek v vodoravnem položaju.

KDAJ SE NE SME UPORABLJATI: nosnega pršila za otroke ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 12 mesecev. Izdelka ne uporabljajte v primeru krvavitve iz nosu (epistakse).

OPOZORILO: Posoda je pod tlakom. Lahko poči, če se segreje. Hraniti ločeno od toplote, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne preluhnajte ali sežigajte, tudi po uporabi. Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C / 122 °F. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne uporabljajte sočasno z drugimi lokalnimi zdravljenji. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Izdelek je primeren za uporabo pri otrocih, starejših od 12 mesecev, in ga mora uporabljati odrasla oseba. Neupoštevanje pogojev za ohranjanje integritete izdelka lahko spremeni njegove funkcionalne lastnosti. Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti. Shranjujte pri temperaturi med 5 °C in 25 °C (41 °F–77 °F).

Proizvajalec Coswell SPA, Via Gobetti 4, 40050, Funo di Argelato (Bo) ITALIJA

Distributer: Pontus Pharma d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 62, 10000 Zagreb, info@pontus-pharma.com

Številka **serije:** Natisnjena na originalni embalaži

Rok uporabnosti: Natisnjen na originalni embalaži