

ISOMAR dekongestivno nosno pršilo

Hipertonična raztopina morske vode iz regije Cinque Terre

Isomar dekongestivno nosno pršilo je hipertonična raztopina na osnovi čiste morske vode, posebej zasnovana za naravno dekongestijo nosne sluznice. Hipertonična morska voda s pomočjo osmoze odstranjuje odvečno sluz iz nosu; ne povzroča odvisnosti in ne poškoduje tkiva.

Uporaba ISOMAR dekongestivnega nosnega pršila je primerna za vlaženje in olajšanje naravnega odtoka iz nosne votline, manjšanje oteklin v zgornjih dihalnih poteh, odstranjevanje zastale sluzi iz naravnih prehodov pri prehladu in alergijskem rinitisu, lajšanje simptomov pri osebah s sinuzitisom in rinosinuzitisom, temeljito čiščenje nosnih votlin z odstranjevanjem cvetnega prahu, prahu in smoga.

NAVODILO ZA UPORABO: Razpršite 2–3 krat v vsako nosnico, največ 3-krat na dan in pustite, da deluje nekaj sekund, nato izpihajte nos. Ne uporabljajte več kot dva tedna. Ne prekoračite priporočenega odmerka. Uporabljajte izmenično z ISOMAR pršilom za dnevno higieno še dva tedna pri posebej trdovratnem rinitisu. Če težave vztrajajo, se posvetujte z zdravnikom ali specialistom. Ne uporabljajte pri dojenčkih, mlajših od enega leta. Po uporabi ISOMAR dekongestivnega nosnega pršila odstranite pršilni nastavek, ga sperite z vodo in pustite, da se posuši. ISOMAR pršilo se lahko uporablja v navpičnem ali vodoravnem položaju za enostavnejše in temeljitejše čiščenje nosu pri odraslih in otrocih. **NAVPIČNO:** omogoča boljši doseg vseh predelov nosne votline za hitrejšo in popolnejšo čiščenje. **VODORAVNO:** pri otrocih, starejših od 12 mesecev, uporabite v vodoravnem položaju.

SESTAVA: Hipertonična morska voda (naravna koncentracija soli v morski vodi približno 3 %). Ne vsebuje konzervansov in barvil, inerten pogonski plin: dušik.

KDAJ SE NE SME UPORABLJATI: Ne uporabljajte ISOMAR pršila za dekongestijo pri otrocih, mlajših od 12 mesecev. Ne uporabljajte v primeru krvavitve iz nosu (epistakse).

OPOZORILO: Posoda je pod tlakom. Lahko poči, če se segreje. Hraniti ločeno od toplote, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne preluknjajte ali sežigajte, tudi po uporabi. Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C / 122 °F. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Samo za predvideno uporabo. Medicinski pripomoček je primeren za uporabo pri otrocih, starejših od 12 mesecev, in ga mora uporabljati odrasla oseba. Neupoštevanje pogojev za ohranjanje integritete izdelka lahko spremeni njegove funkcionalne lastnosti. Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti. Shranjujte pri temperaturi med 5 °C in 25 °C (41 °F–77 °F). V nekaterih primerih lahko izdelek povzroči rahlo draženje.

Proizvajalec: Coswell SPA, Via Gobetti 4, 40050, Fano di Argelato (Bo) ITALIJA

Distributer: Pontus Pharma d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 62, 10000 Zagreb, info@pontus-pharma.com

Številka serije: Natisnjena na originalni embalaži

Rok uporabnosti: Natisnjen na originalni embalaži