

NAZWA PLIKU: ID8930 SANOPHARMA KTT 9ml STICKER 70x136mm REV-8930-202603-1-0-0

MATERIAŁ: folia samoprzylepna

KOLORYSTYKA: ■ BLACK 100%

SIZE — CUT —

GRAFIK: MR

UPORABA

KICK THE TICK® expert Komplet za varno odstranjevanje klopov je medicinski pripomoček, namenjen odstranjevanju klopov, s kože ljudi.

DELOVANJE IZDELKA: Izdelek zamrzne klopa pred odstranitvijo in prepreči izločanje njegove okužene sline.

APRF Technology™ (Anti-Parasite Removal Film) ustvari trajen zaščitni film, ki preprečuje poškodbo klopa med odstranjevanjem ter zmanjšuje tveganje stika z povzročitelji okužb.

KICK THE TICK® Tick Izdelek vsebuje 60 odmerkov, kar zadostuje za odstranitev do 40 klopov. Priporočljivo za zmanjšanje tveganja bolezni, ki jih prenašajo klopi, kot so: klopni meningitis, borelioza, babezioza, anaplazmoza in druge.

SESTAVA: Sestava pršila KICK THE TICK®: izoheksadekan, izopropil miristat, 1,3,3,3-tetrafluoropropan, 1,1,1,2-tetrafluoroetan.

KONTRAINDIKACIJE IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Uporabljajte samo v skladu z navodili. Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 3 let. Pri otrocih uporabljajte le pod nadzorom odrasle osebe. Ne nanašajte na poškodovano ali obolelo kožo. Ne uporabljajte v primeru alergije (preobčutljivosti) na katerokoli sestavino. Izogibajte se stiku z očmi, usti, nosom in intimnimi predeli. Ne vdihavajte. Prekomerna uporaba lahko povzroči pordelost kože. Če pride do draženja, prenehajte z uporabo, kožo sperite s toplo (ne vročo) vodo in jo osušite. Če simptomi vztrajajo (pobelitev, pordelost, otekline, bolečina), se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Samo za zunanjo uporabo.

OPOZORILA: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira, če se segreje. Hranite zaščiteno pred: toploto, vročimi površinami, iskrami, odprtim ognjem in drugimi viri vžiga. Ne kadite. Posode ne preluknjajte in ne sežigajte niti po uporabi. Zaščitite pred svetlobo. Hranite izven dosega otrok.

SHRANJEVANJE: Shranjujte v originalni embalaži, na mestu, ki je izven vidnega polja in dosega otrok, pri temperaturi pod 40 °C.

**PROIZVAJALEC:**

ICB Pharma sp. z o.o.
ul. S. Lema 10
43-603 Jaworzno, Poljska
www.icbpharma.com
office@icbpharma.com

**DISTRIBUTER:**

Top Pharma d.o.o.
Potok pri Komendi 15
SI-1218 Komenda
www.toppharma.si
info@toppharma.si

REV-8930-202603-1-0-0

136mm

70mm