

## HEAT BELT (toplotni pas)

199 mm

**TOPLOTNI PAS:** Sprošča napete in obremenjene mišice ter učinkovito lajša bolečine v predelu hrbta s sproščanjem prijetne, pomirjajoče toplote do 12 ur. Zaradi elastičnosti in prilagodljivega zapenjanja z velcro trakom je pas mehak, nastavljen po velikosti in ga je zato enostavno namestiti in odstraniti. Vsebuje posebne grelne elemente z naravnimi snovmi (železov prah, aktivno oglje in sol), ki ob stiku s kisikom v zraku razvijejo toploto. Hipoalergeno. Dermatološko testirano. Ne vsebuje zdravilnih učinkovin. Medicinski pripomoček.

**Koristni učinki toplote:**

- **Spodbuja krvni obtok:** Toplota izboljša prekrvavitvev z razširitvijo krvnih žil. To poveča količino kisika in hranilnih snovi, ki so bistvene za celice mišičnega tkiva.
- **Pospešuje odstranjevanje presnovnih odpadkov:** Odpadne snovi iz celičnega in mišičnega tkiva se zaradi boljše prekrvavitve lažje izločajo.
- **Blazi bolečino:** Toplota zmanjšuje napetost, lajša bolečino, sprošča in izboljšuje gibljivost.

**NAVODILA ZA UPORABO:** Umijte in osušite prizadeto mesto. Ko ste pripravljeni, vzemite pas iz vrečke in ga razvijte. Predel pasu, ki vsebuje grelne elemente, namestite na kožo bolečega mesta. Nato ovijte elastični trak okoli pasu in ga pritrdite z velcro zapenjanjem tako, da pas ostane na mestu. Pazite, da del pasu z grelnimi elementi ostane v stiku s kožo bolečega mesta. (Da se segreje na pričakovano temperaturo, lahko mine do 30 minut.) Nosite največ 12 ur. Če se uporablja za lajšanje menstrualnih krčev, ga namestite z grelno stranjo na spodnje perilo in ne neposredno na kožo.

**OPOZORILA:** Izdelek lahko ob nepravilni uporabi povzroči opekline.

**Z uporabo prenehajte v primerih:**

- nelagodja, draženja, prekomernega občutka toplote, pekočega občutka, otekline, pordelosti ali kakršne koli druge vztrajne spremembe kože na mestu uporabe.
- vztrajnih simptomov.

**Ne uporabljajte:**

- hkrati z drugimi grelnimi izdelki, kremami ali mazili.
- na poškodovani ali posebej občutljivi koži.
- na podplutbah in oteklinah, nastalih v zadnjih 48 urah.
- pri osebah, ki izdelka ne morejo sami odstraniti, vključno z otroki.
- med spanjem.
- med slikanjem z magnetno resonanco (MRI).
- če pride do puščanja vsebine grelnih elementov in/ali poškodbe izdelka.
- skupaj s kortikosteroidnimi mazili ali drugimi zdravili.
- med športnimi dejavnostmi.

Ne režite izdelka, saj lahko uhajanje vsebine povzroči opekline. Posvetujte se z zdravnikom, če imate težave s krvnim obtokom, srčno obolenje, revmatoidni artritis, diabetes ali ste noseči. Ob neposrednem stiku vsebine izdelka s kožo ali očmi, jih obilno sperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Ob nenamernem zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč.

Izdelek je prepovedano segrevati na kakršen koli način. Shranjujte izven dosega otrok in hišnih ljubljencev. Izdelek lahko povzroči opekline. Med uporabo redno preverjajte kožo na mestu uporabe, da ne pride do opeklin ali draženja. Ne uporabljajte na delih telesa, ki niso občutljivi na toploto, ali pod tesnimi oblačili ter pasovi, da preprečite nastanek opeklin. Izdelka ne uporabljajte več kot 12 ur v obdobju 24 ur. **Pazite, da se grelni elementi ne prepognejo ali prekrivajo, saj to poveča tveganje za opekline. Pri osebah, starejših od 55 let, je tveganje za opekline večje, zato je zanje priporočljivo, da izdelek uporabljajo preko oblačil.** Uporabnik mora o vsakem resnem neželenem dogodku, povezanem z medicinskim pripomočkom, obvestiti proizvajalca in pristojne organe.

REV.002 - 2024/09

Distributer v EU: PXG Pharma GmbH, Pfingstweidstraße 10-12, 68199 Mannheim, Nemčija

135 mm