

PATENTIRANA PROTIBAKTERIJSKA ZAŠČITA STERILEYES®

Sterileyes® je protibakterijska zaščita, ki je nanešena na vlakna tkanine na prevezi in dokazano zmanjša* število morebitno nevarnih bakterij do 99,9 %.

Patentirana protibakterijska tehnologija ohranja prevezo svežo in prijazno koži ter zavira razmnoževanje bakterij, ki povzročajo neprijeten vonj. Sterileyes® ne vpliva na naravno bakterijsko floro vaše kože.

Britanski patent št. 2561707.

UPORABITE TOPLO

Pritisnite na plošček in v trenutku sprožite segrevanje preveze za oči na optimalno temperaturo. Toplo prevezo položite na zaprte oči za lajšanje težav pri različnih stanjih.

3 KORAKI DO USTREZNE HIGIENE VEK

1. Grejte veke. 2. Masirajte veke po postopku, opisanem v priloženem navodilu za uporabo. 3. Očistite izrastišče trepalnic s čistilnim robčkom ali čistilnim sredstvom za veke.

UPORABITE HLADNO

Ohladite prevezo v hladilniku in hladno položite na zaprte oči za lajšanje težav pri različnih stanjih.

LASTNOSTI

- + Patentirana tehnologija Sterileyes®
- + Večkratna uporaba: 100-krat
- + Potovalno pakiranje
- + Odstranljiva pralna prevleka
- + Nastavljiv trak
- + Pripravljeno za takojšnjo uporabo

VSEBINA

- + Vložek Click & Go, ki vsebuje gel
- + Zgibanka z navodili za uporabo
- + Protibakterijska zaščitna prevleka



PMF Consultants Ltd
10 Vail, Donaghadee
Co Down, BT21 0GL
Northern Ireland

Uvoznik in distributer:
Optimed medical d.o.o.,
Litostržarska cesta 44 c,
1000 Ljubljana,
Slovenija



Aktivna sestavina Sterileyes® / Polygiene® je biocidna snov v obliki srebrnega niti / srebrnovega klorida. Srebrna nit zavira rast bakterij in glivic v skoraj 100-odstotni prevezi čisto in svežo. Polygiene® Bioactive je ekološko odobren in zelo potratilarna biodegradabilna in Oeko-tex®. Tako obdelane tkanine se lahko reciklirajo.

Sterileyes® dokazano zmanjša* število morebitno nevarnih bakterij do 99,9 %.
Reference:
MCS Report 90M35A / Assessment of the antibacterial properties of a textile, 2018
MCS Report 93M25C / Assessment of the on going antibacterial activity of a fabric, 2019
MCS Laboratories Ltd. - Registered in England & Wales - Company No. 08121022

UPORABITE TOPLO

ZA LAJŠANJE TEŽAV...

- + Suho oko
- + Vnetje vek (MGD, Blefaritis)
- + Ječmen (Halacij)

in pridruženih simptomov...

- + Boleče oči
- + Občutljive oči
- + Vnete oči



Art80-01-Aug23



DR HILARY
JONES



REUSABLE ANTIBACTERIAL INSTANT HEAT MASK

PREVEZA ZA OČI

LAJŠA SUHE, VNETE, UTRUJENE, BOLEČE OČI

UPORABA
BREZ
MIKROVALOVKE



POTOVALNO
PAKIRANJE



GRETJE
IN
HLAJENJE

UPORABITE HLADNO

ZA LAJŠANJE TEŽAV...

- + Seneni nahod in alergija
- + Vnetje
- + Utrujene in srbeče oči
- + Zabuhle oči
- + Boleče oči
- + Sinusni glavobol
- + Migrena



THE QUEEN'S AWARDS
FOR ENTERPRISE
WINNER 2022